

1,5 mm

0,5 mm

1 mm

228

13,5 mm

31 mm

33 mm

120 mm

822

10 mm

Entil

Ukąszenia

żel 8g

Skład

Wyrób zawiera 15% Osmo 4 (glikol oktylenowy, glikol polietylenowy, glicerol, karbomer, woda oczyszczona) oraz karbomer, wodorotlenek sodu i wodę oczyszczoną.

Wskazania

Łagodzenie miejscowych objawów takich jak: świąd, obrzęk, zaczerwienienie skóry po ukąszeniu owadów (np. komarów). Dla dorosłych i dzieci od 1 dnia życia.

Działanie

Entil ukąszenia jest hydrożelem opartym na bazie fizycznej aktywności osmotycznej, który:

- łagodzi świąd,
- zmniejsza obrzęk,
- łagodzi podrażnienia.

Sposób użycia

Nanieść Entil Ukąszenia na powierzchnię skóry, lekko wmasowując. Pozostawić do wchłonięcia. Czynność powtarzać 2 do 3 razy dziennie.

Przeciwwskazania

Otwarte rany. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników wyrobu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Tylko do użytku zewnętrznego na skórę. Unikać kontaktu z oczami. Podczas nanoszenia wyrobu może towarzyszyć uczucie ściągania. Nie stosować wyrobu w połączeniu z innymi produktami o podobnym zastosowaniu. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.

Afiofarm

41 mm

228

160 mm

31 mm

33 mm

120 mm

822

10 mm

Wszelkie niewykorzystane resztki wyrobu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na adres wskazany na stronie www.urpl.gov.pl.

Warunki przechowywania
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

+15°C

+25°C

Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie, pod warunkiem, że po każdorazowym użyciu wyrobu opakowanie jest ponownie szczelnie zamykane.

Data wydania instrukcji używania: 18.08.2022, wersja 1

CE

2274

MD

osmo 4

Afiofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151

Wyjaśnienie symboli użytych na opakowaniu:

LOT

- nr serii

- termin ważności

i

- zjrzyj do instrukcji użytkowania

+15°C

+25°C

- ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania

- producent

MD

- wyrób medyczny

Afiofarm

41 mm

228

160 mm